

Il trattamento

L'epilazione laser **permanente** è adatta a tutti poichè non comporta alcun rischio per la pelle. Il numero di **sedute** dipende da tanti fattori quali la disposizione genetica, la zona trattata, il tipo di pelle e pelo e la situazione ormonale.

La seduta di epilazione si svolge indicativamente* nel seguente modo:

- Pulizia della zona che deve essere depilata.
- Rasatura tramite rasoio, nel verso del pelo, a meno che il/la cliente non abbia già provveduto qualche giorno prima.
- Copertura di nei, tatuaggi, macchie scure della pelle attraverso l'applicazione di una matita bianca.
- Uso di occhiali protettivi, per operatore e cliente.
- Applicazione di un gel sulla pelle.
- Passaggio del manipolo sulla zona da epilare.
- Rimozione del gel applicato precedentemente.
- Applicazione prodotto lenitivo sulla zona trattata.

SICURO

EFFICACE




*personalizzata in base al cliente.

emmergency

Silk
Yourbody

presso

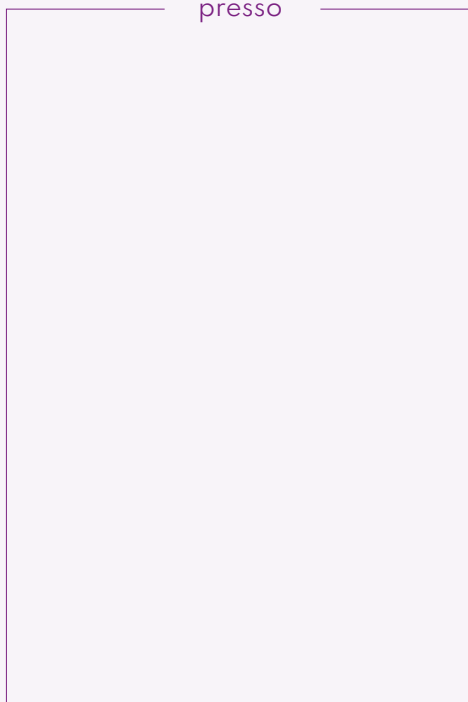

Prodotto fornito da

M-Estetica brand di Gruppo EmmeRent Srl

Via San Colombano 4, 54100 Massa (MS)

Tel: 0585 605611 - N.verde 800 95 24 00 - P.Iva 01227060454

Silk
Yourbody

Epilazione
con Laser al Diodo



**TRATTAMENTO
NON INVASIVO!**

L'epilazione definitiva

I **peli superflui** costituiscono un inestetismo fastidioso per molte donne.

Il trattamento di epilazione che viene effettuato con il laser **SilkYourBody** è di ultima generazione e permette di raggiungere risultati davvero sorprendenti in poco tempo.

La **lunghezza d'onda 808 nm** è adatta alla maggior parte dei tipi di pelle e di peli.



L'efficacia di SilkYourBody



INDOLORE

Il trattamento con laser è indolore, si sente al massimo una sensazione di pizzicore.



PER TUTTO IL CORPO

Il laser può essere effettuato su tutte le parti del corpo: gambe, inguine, braccia, ascelle, viso ecc.



DEFINITIVO

Solitamente servono da un min. di 4-5 fino ad un max. di 10-12 sedute per raggiungere il risultato definitivo.



NESSUN RISCHIO

Il principio che segue è quello della fototermolisi selettiva sul pelo, non danneggia quindi i tessuti circostanti.


Come funziona SilkYourBody

Il laser al diodo **SilkYourBody** utilizza una sorgente di luce con lunghezza d'onda 808 nm, che permette di raggiungere il follicolo pilifero colpendo il bulbo, così da provocare la morte e la caduta del pelo senza intaccare le strutture circostanti.

Il laser emesso dal manipolo dell'apparecchiatura va a colpire la **melatonina**, cioè la proteina che fornisce il pigmento alla pelle e anche al pelo in particolare, rendendo altresì più difficile e rallentata la **ricrescita di nuovi peli**.

L'interazione tra laser e bulbo pilifero è termica. Questo processo viene chiamato "**fototermolisi selettiva**", ovvero l'impulso laser viene assorbito in grande quantità dalla melanina e viene convertito in calore andando così ad aumentare la temperatura del bulbo pilifero.

FOTOTERMOLISI SELETTIVA

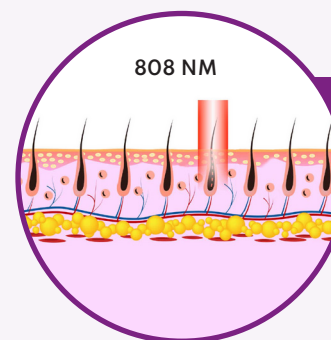

EFFICACIA SU

TUTTI I

FOTOTIPI